

「AED消耗品使用期限を記入するには？」

■ そもそも消耗品って何？

自動対外式除細動器(AED)を使用するには、駆動源の電気を供給するバッテリーと、けいれんした状態の心臓に電気を送る電極パッド(成人用、小児用)が必要不可欠です。これらの消耗品の使用期限が過ぎていると、いざ必要な時にAEDを使用できなくなる可能性があるため、消耗品メンテナンスはとても重要となります。

■ AEDのバッテリー寿命って？

自動対外式除細動器(AED)は、機種によって毎日、毎週、毎月の自動セルフテストを実施するようにプログラムされています。その自動セルフテストによって、バッテリーを消耗します。又、AEDを保管する環境(温度)や使用頻度がバッテリーの消耗に大きく影響します。未使用状態でライフパック500は約4年、ライフパックCRプラスは約2年での交換が必要となりますが、場合によってはそれよりも早く消耗することがあります。

■ 日常点検は何をすれば良いの？

点検担当者が、点検する項目は3点です。

- 1、 AEDのインディケータ画面にOKマークが点灯していることを毎日確認し、記録を残すことが必要です。
- 2、 必要な消耗品の使用期限が切れていないかの確認が必要です。
- 3、 損傷又はヒビ、異物等の付着がないかの確認が必要です。

※ 1ヶ月点検簿を是非ご活用ください。

<http://www.medtronic-lifepak.com/> にてダウンロード可能です。

■ ライフパックCRプラスの消耗品は？


ライフパックCRプラスを新規で購入されたお客様、並びにすでにご購入・設置いただいているお客様は、交換キット(電極パッド 1組を2セット、チャージパック充電器1つ)と小児用電極(オプション)の消耗品メンテナンスが必要です。ライフパックCRプラスは、成人用電極パッドとバッテリーの使用期限を同一にするようにチャージパック充電器にプログラムされており、例えば電極パッドの使用期限が残っていてもバッテリー消耗の際は、すべて交換して下さい。但し、小児用電極(オプション)をお持ちの方で未使用の場合は、そのまま引き続きご使用になれますので、新しい AED 消耗品交換時期表示ラベルには、旧ラベルと同一(邦文ラベル記載)の使用期限年月をそのままご記入ください。

AED 消耗品交換時期表示ラベルの「交換キット」の「交換時期」の年月には、AED本体の小窓から見える年月を記入してください。

【交換キット使用期限確認箇所】



【小児用電極使用期限確認箇所】

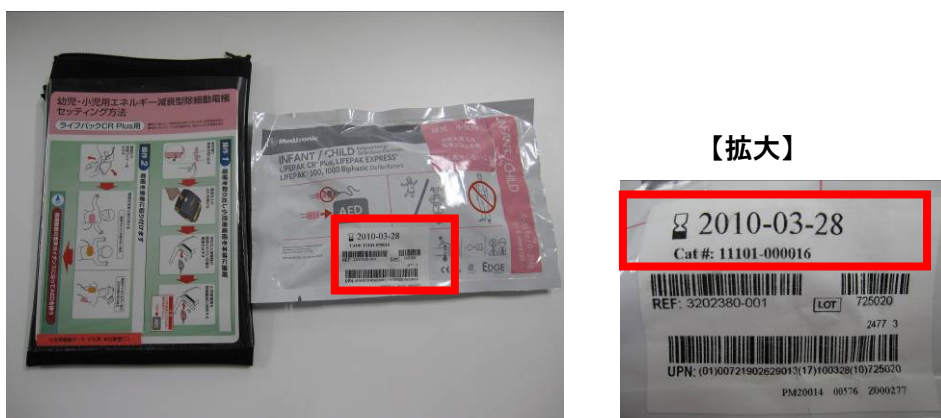

■ ライフパック 500 の消耗品は？

ライフパック 500 をすでにご購入・設置いただいているお客様は、電極パッド、使い捨てバッテリーと小児用電極の消耗品メンテナンスが各々必要です。ライフパック 500 の使い捨てバッテリーに関しては、初回購入から一度も交換されていない場合には購入日から約 4 年後の期日をご記入ください。初回購入から交換されたことのあるお客様はその交換日から約 4 年後の期日を記入してください。

※ * 購入日やバッテリー交換日が不明な場合 * *

あくまでも目安となりますが、バッテリーの有効期限を確認する方法がございます。交換時期はバッテリーを本体に装着してから約4年後ですので、有効期限では期日が前後すると思われませんが、ご不明な場合は交換目安として記入していただく事をお奨め致します。

【確認方法】


- ① 本体バッテリー装着部からバッテリーを取り出すと、白いラベル部分に有効期限の記載があります。
- ② 表示ラベルに有効期限を記入した後にバッテリーを本体に戻してください。
- ③ 緑のON/OFFボタンを押すとセルフチェックを開始しますので、インディケータがOK表示に切りかわりましたら、再度ON/OFFボタンを押し電源を切ります。

※注意！ 一旦バッテリーを取り外すと、起動時に大きな電力を消耗しますので、確認と同時にバッテリーマークが点灯する場合がございます。

【ライフパック 500 使い捨てバッテリー】



【拡大】バッテリー裏記載部分

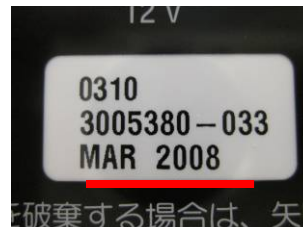

AED 消耗品交換時期表示ラベル LP500 用の消耗品交換時期の年月の欄には、成人用電極(電極パッド)、小児用電極(前述と同様)は、邦文ラベルの「使用期限」を記入ください。

【EDGE クイックコンボ(REDIPAK)】



【拡大】

一般医療機器	
再使用禁止	
一般的名称	体表用除細動電極
販売名	エッジ電極
品名	クイックコンボ (REDIPAK)
モデル番号	11996-000017
製造番号	608314
使用期限	2008年9月28日
医療機器承認番号	21300BZY00413000
MODEL=11996-000017 UBD-08/09/28 LOTNo=608314	